

Multi-Gyn VAGINAL DOUCHE

Vlastnosti výrobku

- vytvořen speciálně pro ženy, ergonomický, může být používán v libovolné poloze
- ideální pro intenzivní hygienu pochvy, k prevenci infekcí pochvy a jiných poševních obtíží
- zajišťuje optimální vyplachovací účinek - mycí roztok vytéká z aplikátoru dopředu a do stran
- speciální membrána zabraňuje zpětnému nasátí roztoku, a také zabraňuje tomu, aby se mycí roztok aplikoval pod nadměrným tlakem
- zajišťuje optimální komfort používání, především díky měkkému tvarovanému tělu, pružnému a hladkému aplikátoru nastavenému v úhlu pro ideální výplach
- prvotřídní pro použití s Multi-Gyn tabletami, ale lze ho také použít pro jiné druhy tekutých výplachů

Ergonomický design

Multi-Gyn Vaginal Douche vyniká unikátním ergonomickým designem. Díky tomuto designu a funkcčnosti je Multi-Gyn Vaginal Douche jediným výrobkem pro poševní výplachy, který získal zařazení „zdravotnický prostředek třídy I“. Výrobek má registraci pro země EU. Multi-Gyn Vaginal Douche je tvořen praktickou, snadno stlačitelnou lahvičkou s pružným, ohebným nástavcem. Ten je zakončen jemně zaobleným aplikátorem se silikonovým ventilem. Lahvičku lze snadno smáchnout jednou rukou. Speciální silikonový ventil umožňuje aplikaci roztoku do pochvy pod přiměřeným tlakem a zároveň přitom zabraňuje tomu, aby se tekutina nasála zpět do lahvičky. To činí používání Multi-Gyn Vaginal Douche zcela bezpečným.

Použití

- pro celkovou hygienu vnějších i vnitřních částí ženských pohlavních orgánů
- pro intenzivní hygienu pochvy v případě nadměrného výtoku/nezvykle zabarveného výtoku/zapáchajícího výtoku, v případě svědění, pálení nebo podráždění
- pro prevenci poševních infekcí a pro podporu při léčbě plísňových i bakteriálních infekcí

Pro zdravé poševní prostředí je důležitá především vhodná hygiena. Zvláště v sexuálně aktivním období ženy, během a po menstruaci a v případě poševních obtíží nebo infekcí. Pomocí výplachu se vyplaví zbytky výtoku a menstruační krve, které se nahromadily v okolí děložního hrdla.

V případě poševních infekcí se takto vyplavují i nežádoucí mikroorganismy a odumřelé buňky. Multi-Gyn Douche je zdravotnický prostředek třídy I pro prevenci poševních infekcí, jako jsou bakteriální a plísňové infekce a pro podporu jejich léčby.

Četnost použití

Použití Multi-Gyn Douche závisí na vašich osobních hygienických potřebách, na vašem životním stylu, vaší sexuální aktivitě (praktikování nechráněného pohlavního styku), nebo vaší menstruaci, atd.

Pro správnou poševní hygienu zpravidla stačí použít Multi-Gyn Douche 1x týdně.

V případě potřeby zvýšené hygieny (např. po menstruaci) použijte Multi-Gyn Douche 3x týdně.

Pro prevenci poševních obtíží použijte Multi-Gyn Douche 3x týdně.

Pro úlevu při poševních obtížích nebo jako podporu při léčbě poševních infekcí použijte Multi-Gyn Douche 2x denně po dobu 5 dní.

V případě přetrvávajících nebo opakujících se obtíží kontaktujte svého lékaře.

Pro dosažení optimálního účinku při obnově poševní flóry se doporučuje po výplachu použít poševní gel s nízkým pH, jako je Multi-Gyn ActiGel nebo Multi-Gyn FloraPlus.

Použití během těhotenství

Nejsou známy žádné kontraindikace, které by omezovaly nebo bránily použití Multi-Gyn Douche během normálního těhotenství.


Díky svému jedinečnému a schválenému designu nedochází při výplachu k nadměrnému tlaku v pochvě. Pokud chcete otěhotnět, pak se doporučuje nepoužívat Multi-Gyn Douche během 24 hodin po pohlavním styku. Multi-Gyn Douche není antikoncepce.

Upozornění

Multi-Gyn Douche nevkládějte do vroucí vody ani vroucí vodou neoplachujte. Došlo by tím k nevratné deformaci výrobku. Multi-Gyn Douche můžete dezinfikovat opláchnutím chlorovým roztokem. Pokud jsou žebra nástavce znečištěná, doporučujeme je vyčistit pomocí nepoužívaného zubního kartáčku.

Návod k použití

Tento preparát může být použit v různých polohách; vsedě na toaletě, vleže ve vaně nebo vstojе ve sprše. Důležité je, aby během výplachu mohla vytékající tekutina volně odtékat. Sama si zvolte polohu, která vám nejlépe vyhovuje.

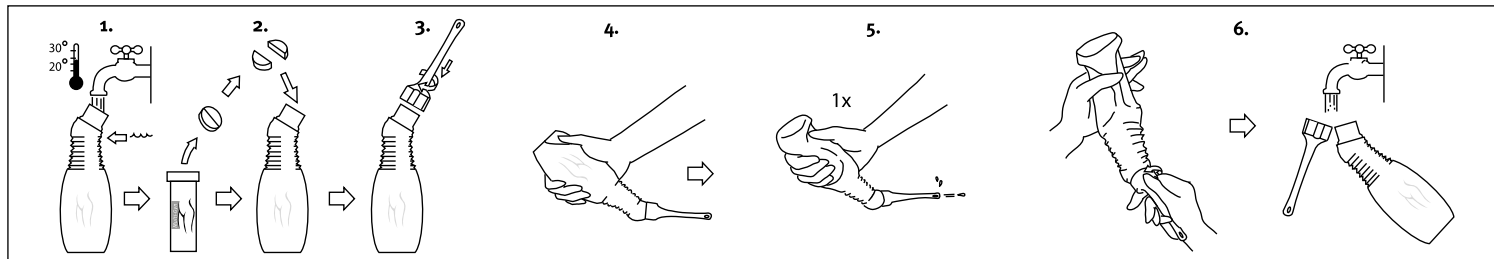

1. Multi-Gyn lahvičku naplňte vlažnou vodou až po hrdlo.
2. Rozlomte Multi-Gyn tabletu a vhodte do lahvičky s vodou.
3. Vyčkejte, až se tableta zcela rozpustí a přestane šumět, poté našroubujte pružný nástavec s aplikátorem.

4. Aplikátor jemně vložte do pochvy.
5. Jemně stlačte lahvičku a pochvu vypláchněte roztokem. Je běžné, že v lahvičce zůstane zbytek roztoku.

6. Nástavec s aplikátorem a lahvičku omyjte teplou vodou a nechte přirozeně oschnout.

Multi-Gyn TABLETS

Vlastnosti výrobku

- 1 tableta = 1 náplň lahvičky Multi-Gyn Douche (irigátor)
 - obsahuje pouze přírodní složky, neobsahuje konzervační látky ani parfémy
 - podporuje růst laktobacilů a optimalizuje přirozené poševní prostředí
 - baleno v malé, diskrétní tabletové tubě
 - je naprosto bezpečný, nemá žádné vedlejší účinky
- V kombinaci s Multi-Gyn Douche nabízí optimální intimní hygienu pro prevenci poševních infekcí a obtíží, jako je svědění, podráždění, pálení, nadměrný nebo zapáchající výtok.

Bezpečné čištění přírodními látkami

Tyto koncentrované šumivé tablety obsahují pouze přírodní látky bez konzervantů. Konzervační látky jsou škodlivé pro rozvoj užitečných bakterií - laktobacilů a pro přirozený stav poševní flóry. Multi-Gyn tablety vytváří perfektní vyplachovací roztok pro účinné a bezpečné vyčištění pochvy. Multi-Gyn tablety obsahují látky, které podporují růst laktobacilů a výtažek z Aloe vera, který příznivě ovlivňuje poševní tkáň. Pro optimální intimní hygienu a pro prevenci bakteriálních a plísňových (kvasinkových) infekcí je nejlepší používat Multi-Gyn tablety v kombinaci s Multi-Gyn Douche (zdravotnický prostředek třídy I).

Složení

Kopolymer polyglukoronické galakturonové kyseliny*, laktóza, kyselina mléčná, kyselina askorbová. *2QR-komplex: patentované bio-aktivní polysacharidy (www.2QR.com).

Multi-Gyn tablety se neužívají perorálně.

Těhotenství a kojení

Nejsou známy žádné kontraindikace při použití výplachů pomocí Multi-Gyn tablet během těhotenství nebo kojení.

Indikace

- pro celkovou hygienu vnějších i vnitřních částí ženských pohlavních orgánů
- pro intenzivní hygienu pochvy v případě nadměrného výtoku/nezvykle zabarveného výtoku/zapáchajícího výtoku, v případě svědění, pálení nebo podráždění
- pro prevenci poševních infekcí a pro podporu při léčbě plísňových i bakteriálních infekcí

Dávkování

Použijte vnitřně pomocí Multi-Gyn Douche. Jednu tabletu nechte rozpustit ve vlažné vodě v lahvičce Multi-Gyn Douche. Nástavec s aplikátorem vložte do pochvy a stisknutím lahvičky vypláchněte pochvu zhotoveným roztokem.

V případě přetrvávajících nebo opakujících se obtíží kontaktujte svého lékaře. K dosažení optimálního účinku pro obnovu poševní flóry se doporučuje po výplachu použít poševní gel s nízkým pH, jako je Multi-Gyn ActiGel nebo Multi-Gyn FloraPlus.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy žádné vedlejší účinky při používání Multi-Gyn tablet.

Skladování

Skladujte v původním obalu v suchém prostředí při pokojové teplotě (10 °C - 25 °C).



Distributor:
Qpharma s.r.o.
Ot. Ostrčička 1155/18
370 05 České Budějovice
info@qpharma.cz, www.qpharma.cz